



Life/form® Pediatric Lumbar Puncture Simulator / 50-558

Description

A crista ilíaca incorporada oferece um realismo excepcional, enquanto a coluna removível, o canal vertebral e a almofada da pele tornam o treino simples e sem complicações. A punção lombar pode ser realizada nos espaços L3-L4, L4-L5 ou L5-S1. O local correto pode ser localizado palpando a crista ilíaca e a coluna vertebral. Uma pequena dose será sentida quando a agulha espinhal for introduzida lentamente para o espaço adequado. O fluido fluirá quando a agulha estiver na posição correta. Os alunos irão apreciar a oportunidade de praticar este procedimento delicado, mas comumente realizado em um simulador que é ao mesmo tempo atraente e anatomicamente preciso.

Benefícios:

- Meta habilidades-chave específicas para procedimentos de punção lombar pediátrica
- Palpação dos pontos de referência
- Preparação da pele
- Posicionamento e inserção de agulhas
- Coleta de líquido cefalorraquidiano
- Medir a pressão do líquido cefalorraquidiano
- Injeções Intratecais

Características:

- Anatomicamente correto e palpável
- Posicionamento correto do corpo
- A almofada lombar é fácil de substituir
- Resistência realista
- Fluxos simulados do líquido cefalorraquidiano com punção bem sucedida

Inclui:

- Placa de fixação robusta para uma maior estabilidade durante o treinamento
- Almofada de punção lombar com coluna e tubagem espinal

- Saco IV com tubagem
- Pó de talco
- Mala de transporte rígida
- Manual de instruções

O manequim mede 19" (483 mm) C x 7" (178 mm) L x 6" (152mm) A

A placa mede 19-1/2" (483 mm) C x 11" (279 mm) L

Date Created

setembro 18, 2022

Prática Brasil