



WNL Practi-MASK® Bag Valve Training Mask Adult Single

Description

Características Principais:

- **Design Realista:** Simula de forma precisa a funcionalidade de um BVM, proporcionando uma experiência prática e imersiva aos estudantes.
- **Material:** Feito de PVC sem látex, o que torna o produto seguro e confortável para todos os usuários, eliminando riscos de alergias relacionadas ao látex.
- **Compatibilidade:** A máscara de treinamento é compatível com manequins de RCP para prática de ventilação.

Benefícios:

- **Confiança e Experiência:** O treinamento com a Practi-MASK® prepara os alunos para situações reais, dando-lhes confiança para realizar a RCP sob pressão.
- **Treinamento Seguro:** A máscara e os componentes podem ser higienizados adequadamente, garantindo o uso em múltiplas sessões sem risco de contaminação.

Conteúdo Incluído:

- Máscara para ventilação com bolsa-válvula.
- Válvula expiratória.
- Bolsa reservatório de ar.
- Instruções de montagem e limpeza.

Instruções de Montagem:

1. Remova todos os componentes da caixa.
2. Abra e desdobre a bolsa-válvula.
3. Anexe a bolsa reservatório ao lado da entrada de ar da válvula.
4. Conecte a máscara de treinamento à válvula expiratória.

Instruções de Limpeza:

- Mergulhe a máscara em uma solução de 1 parte de alvejante e 64 partes de água por 10 minutos.
- Enxágue com água limpa e deixe secar ao ar.
- Limpe a superfície externa da válvula da bolsa com álcool isopropílico ou com a mesma solução usada na máscara.

Aplicação:

Este simulador é ideal para cursos de formação de socorristas, como bombeiros, enfermeiros, equipes de primeiros socorros e estudantes de medicina, proporcionando a prática essencial para a aplicação de ventilação em situações de emergência.

Date Created

novembro 17, 2023

Prática Brasil