



Practi-MASK® | Máscara de treinamento de válvula de saco infantil

Description

- Cada caixa de Practi-MASK®IBVM inclui 4 máscaras infantis de treinamento de RCP Practi-Mask® com 4 bolsas de compressão de válvula e 4 bolsas reservatório. | Item nº 5000IBVM.
- Instruções de montagem
- Remova os componentes da caixa
- Desdobre a bolsa-válvula desmornada separando cada extremidade
- Anexe a bolsa reservatório ao lado da entrada de ar da válvula da bolsa
- Conecte a máscara de treinamento de RCP à válvula expiratória
- Instruções para limpeza
- Mergulhe a porção da máscara de treinamento de RCP por 10 minutos em uma solução de 1 parte de alvejante e 64 partes de água
- Enxágue a máscara com água e deixe secar ao ar
- Limpe as superfícies externas da válvula da bolsa com álcool isopropílico ou a solução indicada acima (1 parte de alvejante e 64 partes de água). Não molhe

Date Created

novembro 21, 2023