



## Prestan Replacement Monitor for Baby

### Description

Quando os alunos praticam compressões de RCP em um Prestan® Infant Manikin, não só verão quando alcançaram e mantiverem a velocidade recomendada mínima de 100 cpm, mas também verão quando atingirem o limite superior de 120 cpm.

#### Os indicadores de luz são os seguintes:

- Uma luz vermelha indica menos de 60 compressões por minuto
- Uma luz amarela indica quando a taxa é de 60 a menos de 80 compressões por minuto
- Uma única luz verde indica quando o aluno está administrando 80 a menos de 100 compressões por minuto
- Duas luzes verdes permitem que os alunos saibam que atingiram 100 a 119 compressões por minuto, auxiliando os estudantes a manterem essa taxa
- Duas luzes verdes e uma luz amarela piscando indicam que o aluno atingiu mais de 120 compressões por minuto e precisa diminuir a velocidade

#### Date Created

setembro 18, 2022